



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



OP10 Inmovilizador de Rodilla Tripanel

Color: Azul / Rojo.

Tallas: 4-6 años / 8-10 años / 12-14 años.

Uso Común:

Indicado para inmovilizar la rodilla, puede ser utilizado para reemplazar la férula de yeso en casos de contusiones y meniscopatías, su uso puede ser previo a una cirugía y/o post quirúrgico, así como lesiones que ameriten inmovilización total de la articulación, como lesiones musculares, de ligamentos y/o luxaciones, su uso deberá ser bajo supervisión médica.

Instrucciones de Uso:

1. Inicie separando cada uno de los paneles laterales.
2. Coloque el panel central que ceunta con los cinturones, por la parte trasera de la pierna, cuidando que las varillas de aluminio estén completamente centradas.
3. Coloque los paneles laterales sujetándolos con las tiras de contacto.
4. Cuide que los paneles estén bien alineados a la misma altura y que el orificio se ubique a la altura de la rótula, rectifique que las varillas laterales se encuentren alineadas de forma vertical paralela al cuerpo.
5. Asegure con los cinturones sin ejercer demasiada fuerza y cierre con el contactel.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon laminada, cierres de contactel, eslabones plásticos y varillas de aluminio.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

4-6 años:

8-10 años:

12-14 años:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

AZUL:

4-6 años: 7506372605520

8-10 años: 7506372605568

12-14 años: 7506372605605

ROJO:

4-6 años: 7506372605490

8-10 años: 7506372605537

12-14 años: 7506372605575



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

