



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Thermo
Seeds[®]



TS01 Antifaz Térmico

Color: Verde.
Tallas: Unitalla.

Uso Común:

Auxiliar para el tratamiento de dolores de cabeza, migraña, desinflama y proporciona relajación gracias a la mezcla de semillas y flores en su contenido.

Instrucciones de Uso:

Para calentar:

1. Retire el antifaz del empaque y coloque dentro del horno de microondas por 30 segundos.
2. Saque del horno sujetando de las cintas y verifique que la temperatura del antifaz sea la adecuada.
3. Coloque sobre los ojos y sujete con las tiras por la parte posterior de la cabeza.
4. Mantenga puesto el antifaz por aproximadamente 20 minutos.

Para enfriar:

1. Coloque el antifaz dentro del empaque original y mantenga en el congelador por un periodo de aproximadamente 40 minutos.
2. Retire del empaque y verifique que la temperatura se agradable.
3. Coloque sobre los ojos y sujete con las tiras por la parte posterior de la cabeza.
4. Mantenga puesto el antifaz por aproximadamente 20 minutos.

Precauciones:

No utilice en casos de dermatitis, heridas expuestas, procesos infecciosos, en presencia de insuficiencia vascular periférica (arteria venosa), zonas de hipotesia y anestesia, en zonas anatómicamente sensibles al calor o en casos de alergia a algún componente.

Advertencias:

Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de poliéster, cinta de poliéster, relleno de semillas y plantas: Alpieste, Menta, Linaza, Eucalipto y Lavanda.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Unitalla: 7506372606916



lavese a mano en
agua templada con
jabón neutro



no exprimir



no utilizar maquinas
de lavar y o secar



no usar cloro



no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO