



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Thermo
Seeds[®]



TS04 Compresa Lumbar

Color: Verde.
Tallas: Chica / Mediana.

Uso Común:

Se utiliza como analgésico y para relajación muscular, lo que ayuda a desinflamar y descontracturar la parte del cuerpo que requiera.

Instrucciones de Uso:

1. Introduzca la compresa en el horno de microondas por un tiempo no mayor a 2 minutos, se recomienda que al ser la primera vez que se utiliza la compresa, se caliente por 1 minuto y medio y posteriormente por intervalos de 30 segundos hasta que la temperatura sea la adecuada, ya que puede variar de horno a horno. El tiempo en microondas no deberá sobrepasar los 2 minutos ya que podría quemar la compresa.
2. Para colocar el producto sobre la piel, verifique que la temperatura no sea elevada para evitar quemaduras en pieles sensibles y posteriormente utilice sobre el área a tratar, el tiempo de aplicación puede ser de 15 a 20 minutos.
3. Después de usar conserve la compresa dentro de su empaque original en el refrigerador para mantener las propiedades aromáticas.

Precauciones:

No utilice en casos de dermatitis, heridas expuestas, procesos infecciosos, en presencia de insuficiencia vascular periférica (arteria venosa), zonas de hipotesia y anestesia, en zonas anatómicamente sensibles al calor o en casos de alergia a algún componente.

Advertencias:

Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de poliéster, relleno de semillas y plantas: Alpiste, Menta y Linaza.

Medidas de Empaque:

Alto:
Ancho:
Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chica:
Mediana:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Chica: 7506372604486
Mediana: 7506372604493



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO