



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**Thermo**  
Seeds<sup>®</sup>



## TS11 Guante Térmico

Color: Verde.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

Se utiliza como analgésico y para relajación muscular, lo que ayuda a desinflamar y descontracturar la parte del cuerpo que requiera.

### Instrucciones de Uso:

Para calentar:

1. Introduzca la compresa en el horno de microondas por un tiempo no mayor a 2 minutos, se recomienda que al ser la primera vez que se utiliza la compresa, se caliente por 1 minuto y medio y posteriormente por intervalos de 30 segundos hasta que la temperatura sea la adecuada, ya que puede variar de horno a horno. El tiempo en microondas no deberá sobrepasar los 2 minutos ya que podría quemar la compresa.

2. Para el contacto con la piel, verifique que la temperatura no sea elevada para evitar quemaduras en pieles sensibles y posteriormente utilice sobre el área a tratar, el tiempo de aplicación puede ser de 15 a 20 minutos.

3. Después de usar conserve la compresa dentro de su empaque original en el refrigerador para mantener las propiedades aromáticas.

Para enfriar:

1. Coloque el guante dentro del empaque original y mantenga en el congelador por un periodo de aproximadamente 40 minutos.

2. Retire del empaque y verifique que la temperatura se agradable.

3. Después de usar conserve la compresa dentro de su empaque original en el refrigerador para mantener las propiedades aromáticas.

### Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Unitalla: 7506372607289

### Precauciones:

No utilice en casos de dermatitis, heridas expuestas, procesos infecciosos, en presencia de insuficiencia vascular periférica (arteria venosa), zonas de hipotesia y anestesia, en zonas anatómicamente sensibles al calor o en casos de alergia a algún componente.

### Advertencias:

Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de poliéster, relleno de semillas y plantas: Alpiste, Menta, Lavanda, Manzanilla y Linaza.



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO